

INFINITY 4D

The 4th dimension of
FACE & BODY LONGEVITY



ethicalTech



OLTRE IL TRATTAMENTO

UNA NUOVA DIMENSIONE ESTETICA

INFINITY 4D è una piattaforma tecnologica di nuova generazione progettata per il trattamento avanzato degli inestetismi di viso e corpo, attraverso un sistema di energia dinamica modulata che lavora in perfetta coerenza con la fisiologia dei tessuti. Non si tratta di una tecnologia aggressiva o standardizzata, ma di un sistema intelligente, capace di adattarsi alle diverse condizioni cutanee e tissutali, stimolando i naturali processi di rigenerazione, tonificazione e rimodellamento.

INFINITY 4D rappresenta l'evoluzione concreta della tecnologia estetica professionale: più profonda, più efficace, più rispettosa della fisiologia.



4D

COSA SIGNIFICA

Il valore distintivo di INFINITY 4D è racchiuso nel suo nome. 4D non è uno slogan, ma un concetto tecnologico preciso, che identifica un'azione su quattro dimensioni fondamentali:

PROFONDITÀ

L'energia lavora su più livelli tissutali, adattandosi alle diverse strutture della pelle, del tessuto connettivo e muscolare

DINAMICITÀ

L'energia è modulata, pulsata e variabile non statica, ma in continuo dialogo con il tessuto

DISTRIBUZIONE ENERGETICA

L'emissione non è concentrata in un singolo punto, ma diffusa in modo controllato e omogeneo, per garantire efficacia e comfort

TEMPO BIOLOGICO

L'azione non si esaurisce durante la seduta, stimola processi rigenerativi che proseguono nel tempo con risultati progressivi e cumulativi

INFINITY 4D LAVORA OGGI, MA CONTINUA A LAVORARE NEL TEMPO.

CINQUE PRINCIPI FISICI IN SINERGIA

INTEGRATI PER LAVORARE IN MODO
COORDINATO E FISIOLOGICO

INFINITY 4D



RADIOFREQUENZA MODULATA MULTIPOLARE E FRAZIONATA



BIOCORRENTI A ONDA QUADRA A TRIPLICE AZIONE



ULTRASUONI PULSATI AD ALTA FREQUENZA



FOTOBIMODULAZIONE LED



LASER LLLT A BASSA INTENSITÀ (980 nm)

Questa combinazione consente di intervenire su:

- TONO E COMPATTEZZA DEI TESSUTI
- QUALITÀ CUTANEA
- METABOLISMO CELLULARE
- MUSCOLATURA E FASCIA
- RIMODELLAMENTO E RIDEFINIZIONE DELLE FORME

Il tutto in modo naturale, nel rispetto dei ritmi biologici

VISO

Antiage evoluto, tono e qualità della pelle

Nel trattamento VISO, INFINITY 4D consente di costruire protocolli personalizzati ad alta efficacia, lavorando su:

RILASSAMENTO
CUTANEO

ATONIA
MUSCOLARE

RUGHE E SEGNI
DEL TEMPO

TEXTURE
IRREGOLARE

COLORITO
SPENTO

L'azione energetica stimola:

- I FIBROBLASTI
- LA PRODUZIONE DI COLLAGENE ED ELASTINA
- LA RICOMPATTAZIONE DELLA GRANA CUTANEA

Il risultato è muscoli più tonici, una pelle più tonica, distesa, luminosa e uniforme, con un effetto naturale e progressivo. Ridefinisce i volumi muscolari e rimodella l'ovale del volto, ringiovanimento naturale senza filler o botox.

CORPO

Rimodellamento, tonificazione e mio-sculpting

Nel trattamento corpo, INFINITY 4D lavora in modo profondo e mirato su:

ADIPOSITÀ
LOCALIZZATE

RILASSAMENTO
CUTANEO

PERDITA DI
TONO
MUSCOLARE

INestetismi
della
CELLULITE

ALTERAZIONI
della FASCIA
MUSCOLARE

Grazie all'azione combinata delle energie e ai manipoli dedicati, è possibile intervenire su:

- TESSUTO ADIPOSO
- MUSCOLATURA SUPERFICIALE E PROFONDA
- FASCIA MIOFASCIALE

Il corpo appare più compatto, tonico, ridefinito, con una silhouette visibilmente rimodellata.



PERCHÉ SCEGLIERLA

PER IL PROFESSIONISTA


- TECNOLOGIA COMPLETA E VERSATILE
- PROTOCOLLI PERSONALIZZABILI
- POSIZIONAMENTO PREMIUM
- ALTA FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA

PER IL CLIENTE FINALE

- TRATTAMENTI NON INVASIVI
- SENSAZIONE DI BENESSERE E COMFORT
- RISULTATI PROGRESSIVI REALI E NATURALI
- APPROCCIO RISPETTOSO DELLA FISIOLOGIA



LA NUOVA DIMENSIONE DELLA BELLEZZA

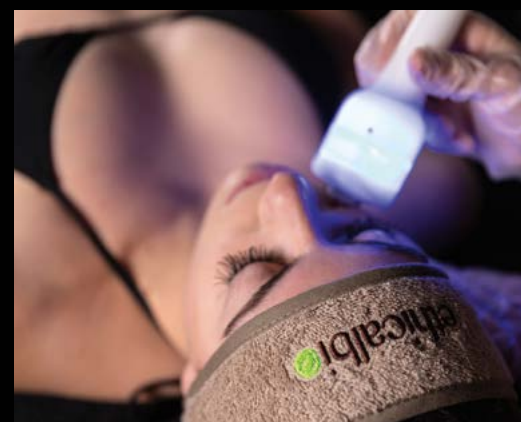

INFINITY 4D non è solo una tecnologia.
È un metodo di lavoro, una filosofia estetica,
una nuova dimensione della rigenerazione.

- DOVE L'ENERGIA NON FORZA, MA STIMOLA
- DOVE IL RISULTATO È PROFONDO E DURATURO

I MANIPOLI: PRECISIONE E VERSATILITÀ

INFINITY 4D è dotata di 8 manipoli specifici,
progettati per adattarsi alle diverse aree del viso
e del corpo e per costruire protocolli altamente
personalizzati.

Ogni manipolo lavora in modo mirato, garantendo:

- PRECISIONE DI TRATTAMENTO
- COMFORT PER IL CLIENTE
- MASSIMA EFFICACIA NEI RISULTATI



IL CONTATTO UMANO RIMANE CENTRALE

Nel trattamento viso e corpo le biocorrenti di INFINITY 4D permettono all'estetista di unire competenza manuale ed energia intelligente, rendendo il tocco più performante e il risultato più visibile e duraturo. Questa integrazione rappresenta uno degli elementi più distintivi dell'approccio 4D, in cui l'energia non sostituisce il gesto professionale ma lo potenzia, trasformando il contatto umano in un vero strumento di risultato.

INFINITY 4D

Queste modulazioni favoriscono l'attivazione dei processi metabolici e funzionali delle cellule supportando la produzione di ATP e i meccanismi di autoregolazione riequilibrio energetico e miglioramento della risposta tissutale.

L'azione delle biocorrenti stimola le cellule a rispondere in modo coerente con le proprie capacità metaboliche rispettando i ritmi biologici individuali e accompagnando il tessuto in un processo di rigenerazione progressiva e fisiologica.



La tecnologia lavora in sinergia:

OGNI MOVIMENTO
DIVENTA
PIÙ EFFICACE

OGNI MANUALITÀ
VIENE
AMPLIFICATA

OGNI TRATTAMENTO
ACQUISTA MAGGIORE
PROFONDITÀ E RISULTATO



LE MANI RESTANO PROTAGONISTE

INFINITY 4D

*La tecnologia le trasforma in uno
strumento tecnologico attivo*



Attraverso l'utilizzo dei guanti conduttivi le biocorrenti di INFINITY 4D favoriscono anche la veicolazione degli attivi contenuti nei cosmetici applicati, migliorandone la penetrazione e l'assorbimento a livello cutaneo e aumentando la ricettività del tessuto senza alterarne l'equilibrio fisiologico. I guanti trasformano le mani dell'estetista in uno strumento tecnologico attivo, capace di potenziare e amplificare ogni manualità, valorizzando competenze tecniche sensibilità e gesto professionale.

SISTEMA CORPO AVANZATO

Nel trattamento corpo INFINITY 4D esprime la sua massima efficacia attraverso manipoli dedicati ad azione profonda e sinergica, progettati per intervenire sulla struttura del tessuto adiposo muscolare e fasciale in modo mirato progressivo e fisiologico.

L'approccio corpo di INFINITY 4D non si limita al trattamento superficiale dell'inestetismo ma lavora sulla qualità funzionale dei tessuti, favorendo mobilità tono compattezza e rimodellamento armonico della silhouette. L'azione energetica è modulata per adattarsi alle diverse condizioni tissutali e alle esigenze individuali permettendo di costruire percorsi corpo personalizzati che rispettano i tempi biologici e valorizzano la risposta naturale del corpo. Attraverso la combinazione dei diversi manipoli è possibile intervenire in modo selettivo su cellulite, adiposità localizzate, rilassamento cutaneo, perdita di tono muscolare e rigidità fasciale, offrendo risultati visibili e duraturi. Il sistema corpo INFINITY 4D rappresenta un approccio evoluto, professionale e completo, pensato per centri estetici che desiderano distinguersi per qualità di trattamento, efficacia e rispetto della fisiologia.



INFINITY 4D

MIOFASCIAL MATRIX

MIOFASCIAL MATRIX è un manipolo corpo **brevettato** progettato per agire in modo mirato sulla fascia muscolare profonda, una struttura fondamentale per l'equilibrio del corpo la qualità del movimento e la morfologia dei tessuti



La fascia rappresenta un vero e proprio sistema di connessione tra muscoli tessuto adiposo e pelle e quando perde elasticità o presenta aderenze può compromettere la fluidità del movimento e favorire alterazioni estetiche e funzionali.

Attraverso l'azione dell'**energia termica modulata multipolare** MIOFASCIAL MATRIX lavora sullo **scollamento dei piani tissutali**, favorendo la liberazione delle aderenze fasciali e ripristinando la naturale **elasticità e scorrevolezza dei tessuti**.

L'intervento profondo sulla fascia consente di migliorare la **mobilità tissutale** e di agire in modo efficace sugli **accumuli adiposi**

ostici, spesso associati a rigidità fasciale e a **cellulite in fase di sclerotizzazione**, condizioni in cui i trattamenti superficiali risultano meno efficaci.

L'azione miofasciale favorisce inoltre un **riassetto strutturale dei tessuti**, migliorando la qualità cutanea la compattezza e la risposta biomeccanica del corpo rendendo il tessuto più ricettivo ai trattamenti successivi.

Miofascial Matrix contribuisce anche a una sensazione di **leggerezza e libertà di movimento**, migliorando il comfort corporeo e l'armonia della silhouette.

Il manipolo è indicato nei **protocolli corpo avanzati** di INFINITY 4D in cui è necessario intervenire in profondità sulla struttura fasciale per ottenere risultati più stabili duraturi e visibilmente armonici nel tempo.



COMBODY SHAPE

COMBODY SHAPE è un manipolo corpo multifunzionale progettato per il trattamento completo del **rimodellamento corporeo**, attraverso l'azione simultanea e sinergica di **radiofrequenza modulata multipolare, ultrasuoni pulsati ad alta frequenza e fotodetossinazione**



Questa combinazione energetica consente di lavorare contemporaneamente su tessuto adiposo, **tessuto cutaneo e microcircolo**, ottimizzando i tempi di trattamento e aumentando in modo significativo l'efficacia dei protocolli corpo.

La radiofrequenza modulata multipolare genera un **calore endogeno controllato** che favorisce la stimolazione del collagene e il **miglioramento del tono**, della **compattezza cutanea** e dell'elasticità del tessuto contribuendo a una progressiva ridefinizione delle forme. Gli **ultrasuoni pulsati ad alta frequenza** integrati nel manipolo operano con **potenza fino a 1 W regolabile e 5 differenti modulazioni**, consentendo un'azione altamente personalizzabile in funzione dello stato del tessuto e dell'obiettivo del trattamento.

La possibilità di modulare l'intensità e la modalità di emissione permette di intervenire in modo mirato sugli **accumuli adiposi**, favorendo attraverso effetti **meccanici e micromeccanici** la riduzione volumetrica delle adiposità localizzate e l'ammorbidimento della fibra.

La **fotodetossinazione** supporta il drenaggio dei liquidi e delle tossine migliorando l'ossigenazione dei tessuti e favorendo il **corretto funzionamento del sistema linfatico**, contribuendo a una sensazione di leggerezza e benessere immediatamente percepibile.

Grazie alla **sinergia delle tre tecnologie** e alla regolazione avanzata degli ultrasuoni **COMBODY SHAPE consente di costruire trattamenti corpo efficaci** ma fisiologici adattabili alle diverse condizioni tissutali.

Il manipolo risulta particolarmente indicato nei trattamenti di **cellulite, adiposità localizzate, rimodellamento della silhouette** e miglioramento della **qualità del tessuto**, offrendo risultati visibili progressivi e armonici nel pieno rispetto della fisiologia.



MIO RIGENERA

MIO RIGENERA è un manipolo corpo specificamente progettato per i trattamenti di **tonificazione e rigenerazione muscolare**, sviluppato per intervenire in modo mirato sui **fasci muscolari superficiali** nel pieno rispetto della fisiologia



La struttura del manipolo e la tecnologia integrata consentono di lavorare sulla componente muscolare come elemento fondamentale del sostegno dei tessuti e della definizione della silhouette.

L'azione di MIO RIGENERA si basa sulla **sinergia tra energia termica modulata, stimolazione micromeccanica e fotostimolazione**, creando una bioattivazione dinamica che favorisce la vascolarizzazione e il miglioramento della qualità del tessuto muscolare. Il calore endogeno controllato contribuisce a una maggiore elasticità delle fibre mentre la stimolazione micromeccanica agisce sulla reattività del muscolo favorendo una risposta tensoria naturale.

La fotostimolazione completa l'azione energetica supportando i processi metabolici e rigenerativi e

migliorando la capacità di recupero del tessuto.

Questa combinazione permette di ottenere una **stimolazione muscolare efficace ma non invasiva**, favorendo un miglioramento progressivo del **tono**, della **compattezza** e del **sostegno dei tessuti**.

L'intervento sui fasci muscolari contribuisce inoltre a una **riattivazione metabolica locale** che supporta i processi di rimodellamento corporeo e potenzia l'efficacia dei protocolli dedicati alla riduzione degli inestetismi.

MIO RIGENERA è particolarmente indicato nei protocolli corpo di INFINITY 4D dedicati a **rilassamento muscolare, perdita di tono, rimodellamento della silhouette**

e come trattamento di supporto nei percorsi corpo avanzati. Il risultato è un corpo visibilmente più **tonico compatto e sostenuto**, con una sensazione di forza leggerezza e benessere che accompagna il miglioramento estetico.



SISTEMA VISO ANTIAGE EVOLUTO

Nel trattamento viso INFINITY 4D esprime il massimo delle sue potenzialità attraverso manipoli dedicati che consentono di lavorare in modo mirato e progressivo sui principali segni dell'invecchiamento cutaneo. L'azione energetica è progettata per stimolare i tessuti nel rispetto della fisiologia favorendo compattezza tono e qualità della pelle senza stress o aggressioni.

Nel trattamento viso INFINITY 4D esprime il massimo delle sue potenzialità attraverso manipoli dedicati ad alta precisione che consentono di lavorare in modo mirato progressivo e personalizzato sui principali segni dell'invecchiamento cutaneo. L'azione energetica è progettata per stimolare i tessuti nel pieno rispetto della fisiologia, favorendo compattezza tono e qualità della pelle senza stress né aggressioni e accompagnando il tessuto in un percorso di rigenerazione naturale.



RF BIPOLARE MATRIX

Il manipolo RF Modulata Bipolare Fasciale Matrix è progettato per i trattamenti viso ad azione distensiva e tensoria, rappresentando la base ideale dei protocolli antiage di INFINITY 4D.

La trasmissione dell'energia avviene tra i due poli presenti nella testina consentendo lo sviluppo di calore endogeno controllato negli strati più superficiali e medi della pelle con una distribuzione uniforme e confortevole.

Questa azione termica modulata favorisce una contrazione immediata delle fibre di collagene e una stimolazione progressiva dei fibroblasti migliorando visibilmente il tono cutaneo la compattezza e l'elasticità del tessuto.

Il risultato è una pelle più distesa uniforme e tonica, con un aspetto visibilmente più fresco e levigato già dalle prime sedute.

Il manipolo RF Bipolare Matrix è indicato come trattamento antiage di base, come mantenimento e come fase preparatoria ideale ai trattamenti più intensivi poiché aumenta la ricettività del tessuto e ne ottimizza la risposta biologica.





RF FRAZIONATA 37 PIN


La **RF Modulata Frazionata 37 Pin** è una testina circolare progettata per trattamenti viso antiage ad **azione più profonda e intensiva**, ideale quando è necessario intervenire sulla struttura del tessuto in modo mirato.

L'emissione energetica è frazionata e concentrata su **37 microantenne**, consentendo una **biostimolazione selettiva dei tessuti profondi** e un'azione mirata sulla matrice dermica.

Questa modalità di trattamento favorisce una **ricompattazione della grana cutanea**, una stimolazione intensa dei fibroblasti e un miglioramento progressivo della densità e della qualità della pelle.

Il frazionamento dell'energia permette di lavorare in profondità mantenendo **elevati livelli di comfort** e tempi di recupero ottimali rendendo il trattamento efficace ma ben tollerato.

La RF Frazionata 37 Pin è particolarmente indicata nei **protocolli antiage intensivi**, per pelli rilassate ispessite o segnate dal tempo e per migliorare visibilmente **texture densità elasticità e uniformità cutanea**.

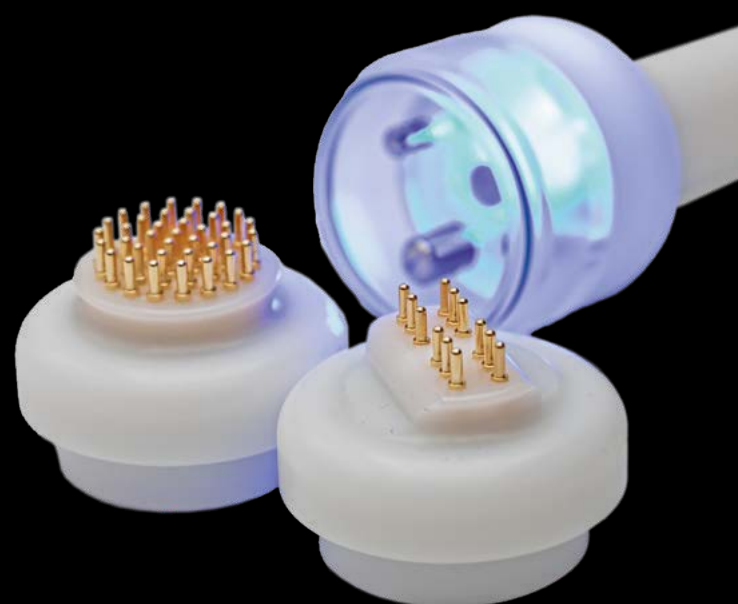

RF FRAZIONATA 12 PIN

La **RF Modulata Frazionata 12 Pin** è una testina lineare progettata per trattamenti viso **altamente mirati e localizzati**, ideale per lavorare con estrema precisione su aree specifiche.

L'energia viene concentrata su **12 microantenne disposte in modo lineare**, permettendo un'azione selettiva e controllata su rughe solchi e segni marcati.

Questa tecnologia consente un **effetto riempitivo localizzato** favorendo una stimolazione profonda del tessuto e una riorganizzazione delle fibre dermiche che migliora la struttura e la compattezza della pelle.

L'azione frazionata stimola i tessuti in profondità favorendo un miglioramento strutturale progressivo e un aspetto cutaneo più uniforme e levigato.

La RF Frazionata 12 Pin è indicata anche per il trattamento di **smagliature di nuova formazione** e per tutte le situazioni in cui è necessario un intervento **selettivo preciso e mirato**, integrandosi perfettamente nei protocolli viso avanzati.



INFINITY 4D



RADIOFREQUENZA MODULATA MULTIPOLARE E FRAZIONATA

La radiofrequenza modulata multipolare di INFINITY 4D rappresenta il cuore tecnologico del sistema ed è progettata per lavorare in modo dinamico e fisiologico sui tessuti del viso e del corpo.

Questa tecnologia utilizza un'emissione energetica controllata e modulata che consente di generare calore endogeno progressivo, distribuito in modo uniforme attraverso più poli, evitando concentrazioni eccessive e garantendo un elevato livello di comfort durante il trattamento.

L'azione multipolare permette all'energia di diffondersi tridimensionalmente all'interno del tessuto favorendo una stimolazione profonda ma equilibrata che si adatta alle diverse caratteristiche cutanee e tissutali.

La modulazione dell'energia consente di lavorare in coerenza con l'impedenza del tessuto, adattando l'intensità e la profondità di azione in modo automatico e intelligente.

Nel viso la radiofrequenza modulata multipolare stimola la contrazione immediata delle fibre di collagene e favorisce l'attivazione dei fibroblasti migliorando tono compattezza ed elasticità della pelle con un effetto distensivo naturale e progressivo.

Nel corpo l'azione termica controllata contribuisce a migliorare la qualità del tessuto connettivo, a sostenere i processi di rimodellamento e a favorire una migliore risposta dei tessuti agli stimoli successivi.

La radiofrequenza modulata multipolare lavora sempre nel rispetto della fisiologia cutanea, senza shock termici o stress tissutali e rappresenta una tecnologia sicura efficace e versatile adatta a protocolli viso e corpo.





BIOCORRENTI A ONDA QUADRA A TRIPLICE AZIONE

Le **biocorrenti di INFINITY 4D** sono correnti bifasiche a **onda quadra a tripla azione** appositamente progettate per interagire con i tessuti in modo fisiologico e intelligente simulando i naturali meccanismi del **sistema di comunicazione cellulare**.

Questa tecnologia si basa su una **modulazione precisa dell'impulso elettrico**, che permette alle cellule di riconoscere il segnale come compatibile con il proprio linguaggio biologico favorendo una risposta naturale e non forzata.

A differenza delle stimolazioni elettriche tradizionali le biocorrenti di INFINITY 4D non impongono un'azione meccanica ma **dialogano con il tessuto**, adattandosi alle sue condizioni e alle sue capacità metaboliche.

Oltre all'onda elettrica principale il sistema genera **frequenze di battimento** che determinano una modulazione specifica studiata per trasmettere **informazioni energetiche riconoscibili e interpretabili a livello cellulare e tissutale**.

Queste modulazioni favoriscono l'attivazione dei **processi metabolici e funzionali delle cellule**, supportando la produzione di **ATP** e i meccanismi di autoregolazione riequilibrio energetico e miglioramento della risposta biologica del tessuto.

L'azione delle biocorrenti stimola le cellule a rispondere in modo coerente con le proprie capacità metaboliche rispettando i **ritmi biologici individuali** e accompagnando il tessuto in un processo di **rigenerazione progressiva e fisiologica**.

Nel trattamento viso e corpo le biocorrenti di INFINITY 4D contribuiscono a migliorare il **tono**, la **vitalità tissutale** e la qualità della risposta biologica preparando il tessuto a ricevere in modo più efficace gli stimoli delle altre tecnologie integrate.

All'interno del sistema INFINITY 4D le biocorrenti rappresentano un elemento chiave dell'approccio **4D**, in cui l'energia non forza il tessuto ma lo **attiva, lo riequilibra e lo accompagna nel tempo**, favorendo risultati armonici duraturi e pienamente rispettosi della fisiologia.



LASER LLLT 980 nm LOW LEVEL LASER TREATMENT

Il **Laser LLLT 980 nm** integrato in INFINITY 4D è una tecnologia a **bassa intensità** progettata per lavorare in modo **non invasivo** e **non termico**, rispettando la fisiologia dei tessuti e i naturali processi biologici dell'organismo.

Il principio di funzionamento del **Low Level Laser Treatment** si basa sull'emissione di energia luminosa a lunghezza d'onda specifica in grado di interagire con le cellule senza generare calore né stress tissutale favorendo una stimolazione metabolica controllata.


Negli ultimi anni questa tecnologia è stata ampiamente utilizzata nei trattamenti di **rimodellamento corporeo non invasivo**, in particolare per il miglioramento degli inestetismi legati a **cellulite e pannicoli adiposi**, dimostrando elevati standard di sicurezza ed efficacia.

L'azione del Laser LLLT 980 nm favorisce una **riattivazione dei processi cellulari** coinvolti nel metabolismo dei grassi e nel miglioramento della qualità del tessuto contribuendo a una progressiva ridefinizione delle forme corporee.

All'interno di INFINITY 4D il **Laser LLLT lavora in sinergia con le altre tecnologie**, potenziandone l'efficacia e consentendo un approccio globale al rimodellamento della silhouette.

Questa azione combinata favorisce un miglioramento visibile del **tono cutaneo**, della **compattezza e dell'idratazione dei tessuti** rendendo la pelle più uniforme e vitale.

Il Laser LLLT 980 nm rappresenta una soluzione ideale per i protocolli corpo in cui è richiesto un intervento efficace ma delicato capace di accompagnare il processo di rimodellamento in modo progressivo e fisiologico.

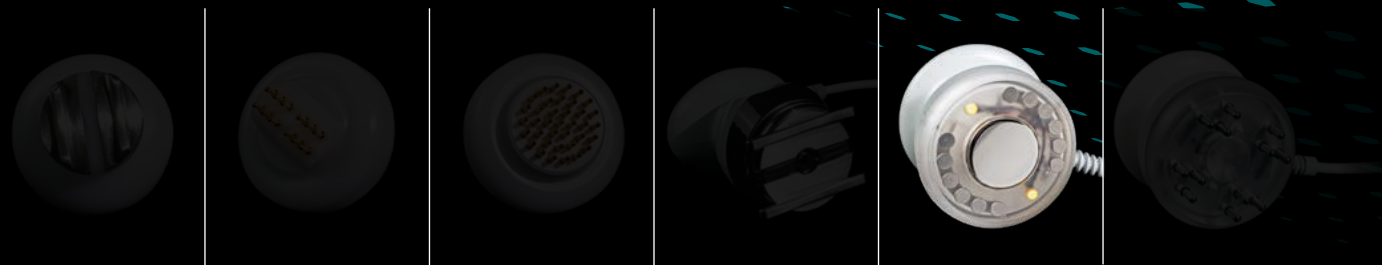

ULTRASUONI PULSATI MODULATI AD ALTA FREQUENZA

Gli **ultrasuoni pulsati modulati ad alta frequenza** integrati in INFINITY 4D rappresentano una tecnologia avanzata per il trattamento del corpo progettata per agire in modo mirato e fisiologico sul tessuto adiposo e connettivo.

L'**azione degli ultrasuoni** si sviluppa attraverso tre effetti principali che lavorano in sinergia favorendo il rimodellamento corporeo e il miglioramento della qualità dei tessuti.

Il **primo effetto è termico** e consiste nella trasformazione dell'energia ultrasonica in calore controllato che contribuisce a un riscaldamento progressivo dei manipoli e dei tessuti favorendo una maggiore ricettività tissutale e potenziando l'azione delle altre tecnologie integrate. Questo effetto viene gestito in modo sicuro e modulato per garantire comfort e rispetto della fisiologia.

Il **secondo effetto è meccanico** e si manifesta attraverso la penetrazione del fascio ultrasonico nel tessuto generando una vibrazione controllata che stimola la matrice tissutale e favorisce l'emersione degli agglomerati adiposi verso strati più superficiali rendendo il tessuto più reattivo al trattamento.

Il **terzo effetto è micromeccanico** ed è caratterizzato da una continua variazione pressoria del fascio ultrasonico che entra in contatto diretto con l'adipocita modificandone temporaneamente la struttura. Questo processo aumenta la permeabilità della membrana citoplasmatica facilitando la fuoriuscita del contenuto trigliceridico e determinando una **riduzione volumetrica progressiva della cellula adiposa**.

Nel tempo questo cambiamento strutturale contribuisce a una lenta e graduale **devitalizzazione dell'adipocita**, accompagnata da un miglioramento generale della qualità del tessuto.

Gli effetti **meccanico e micromeccanico**, considerati predominanti, permettono una **riduzione volumetrica delle adiposità localizzate** e un significativo **ammorbidimento della fibra**, rendendo il tessuto più uniforme e compatto.

Gli ultrasuoni pulsati modulati ad alta frequenza trovano applicazione ideale nei protocolli corpo di **rimodellamento, cellulite e adiposità localizzate**, soprattutto in combinazione con le altre tecnologie di INFINITY 4D, per risultati progressivi e armonici nel pieno rispetto della fisiologia corporea.



FOTOBIMODULAZIONE LED DA 420 A 680 nm

La **fotobiomodulazione LED di INFINITY 4D** utilizza un'emissione luminosa a **spettro controllato nel range 420-680 nm**, progettata per interagire con i tessuti in modo **fisiologico, non invasivo e progressivo**, supportando i naturali processi di riequilibrio e rigenerazione cutanea.

La luce LED agisce come **stimolo bioenergetico delicato**, in grado di migliorare la **vitalità tissutale** e la qualità della risposta biologica della pelle senza generare stress o calore eccessivo.

Grazie all'utilizzo di diverse lunghezze d'onda all'interno dello stesso spettro la fotobiomodulazione può adattarsi alle **diverse condizioni del tessuto**, integrandosi in modo flessibile nei protocolli viso e corpo.

Nel trattamento **viso** la fotobiomodulazione LED contribuisce a migliorare **luminosità, comfort e uniformità cutanea**, accompagnando la pelle in un percorso di rigenerazione progressiva e rispettoso della fisiologia.

Nel trattamento **corpo** la luce LED supporta i protocolli finalizzati al miglioramento della **qualità tissutale**, favorendo una sensazione di benessere e leggerezza e contribuendo al riequilibrio dei tessuti in sinergia con le altre tecnologie.

All'interno di **INFINITY 4D** la fotobiomodulazione LED non viene utilizzata come tecnologia isolata ma come **elemento di supporto biologico**, capace di **potenziare l'efficacia complessiva del trattamento** e migliorare la risposta del tessuto agli stimoli energetici.

L'azione luminosa contribuisce inoltre a creare un trattamento più **armonico e confortevole**, migliorando la percezione della seduta da parte della cliente e rendendo il percorso estetico più piacevole e fidelizzante.

La fotobiomodulazione LED rappresenta quindi una componente fondamentale dell'approccio **4D**, in cui ogni tecnologia lavora in sinergia per accompagnare il tessuto nel **tempo biologico**, favorendo risultati progressivi, naturali e duraturi.

TRATTAMENTI MISURABILI, RISULTATI REALI

UNA SEDUTA



UNA SEDUTA



UNA SEDUTA



UNA SEDUTA



UNA SEDUTA



DUE SEDUTE



UNA SEDUTA



DUE SEDUTE



DUE SEDUTE



TRE SEDUTE



DIECI SEDUTE



TRE SEDUTE



INFINITY 4D

Four Dimensions, One Infinite Energy.





ETHICALBEAUTY SRL

VIA MAZZINI 1

24019 ZOGNO (BG) - ITALY

T. +39 0345 247346

www.ethicalbeauty.it info@ethicalbeauty.it

ethicalbio

ethicalFit

ethicalTech

